



## Offrir un nouveau standard de confort aux mamans

Le set PersonalFit™ PLUS pour tire-lait Symphony® a été conçu pour épouser les contours naturels du sein allaitant et favoriser une expression en douceur. Les essais cliniques ont démontré qu'il offrait davantage de confort durant les séances d'expression avec 100 % des mamans le notant favorablement.<sup>1,2</sup>

**Sets PersonalFit™ PLUS pour tire-lait Symphony®**

Plus de lait. Plus de confort. Plus d'efficacité.



# Testé par des mamans lors d'essais cliniques



## Un aspect plus naturel

La forme ovale redessinée de la tétérerie PersonalFit™ PLUS favorise la détente des mamans, comme l'explique Dr Danielle Prime, Medela Medical Research Associate : « Le nouveau set pour tire-lait suscite une réaction émotionnelle chez les mamans. Il leur semble plus confortable avant même de l'avoir utilisé. Les mamans constatent ensuite que l'expérience confirme leurs attentes. »



## Un ajustement plus naturel

Grâce à la base de données unique de Medela composée de mammographies 3D de seins allaitants, l'équipe de recherche a découvert que l'angle du col de tétérerie à 105° épousait mieux l'anatomie. Les essais du nouveau set pour tire-lait PersonalFit™ PLUS réalisés par des mamans ont confirmé cette découverte :

- 100 % d'entre elles affirment qu'il épouse bien le sein<sup>2</sup>
- 95,5 % d'entre elles affirment qu'il est correctement centré<sup>2</sup>

En outre, grâce à la nouvelle tétérerie ovale pivotant à 360°, l'utilisatrice peut changer facilement de position pour se mettre à l'aise pendant la séance d'expression.




## Un toucher plus naturel


Medela cherche à rapprocher autant que possible l'expression du lait maternel du comportement d'allaitement naturel du nourrisson. Les premiers essais cliniques du set pour tire-lait PersonalFit™ PLUS ont révélé que les mamans dépendantes d'un tire-lait le trouvent plus doux et plus facile à utiliser que le set pour tire-lait standard.<sup>2</sup>

- 83 % d'entre elles affirment ressentir une expression plus naturelle<sup>2</sup>
- 95,5 % d'entre elles ont senti un frottement minime sur la peau<sup>2</sup>
- 100 % d'entre elles ont affirmé avoir une marque minime sur la peau, voire aucune<sup>2</sup>

Elles ont également affirmé que le set pour tire-lait PersonalFit™ PLUS offrait une expérience de « succion du mamelon » et de « mouvement du mamelon » plus agréable, tout en soulignant une diminution des sensations de tiraillement.<sup>2</sup>

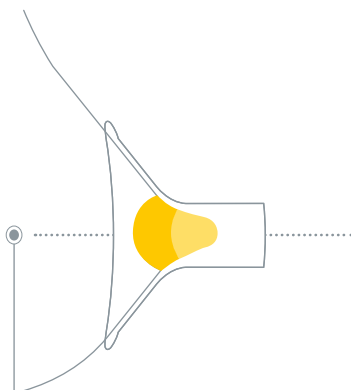

Pour un bon ajustement, le mamelon doit être centré dans l'embout de la tétérerie avec suffisamment d'espace pour s'étirer et bouger librement.

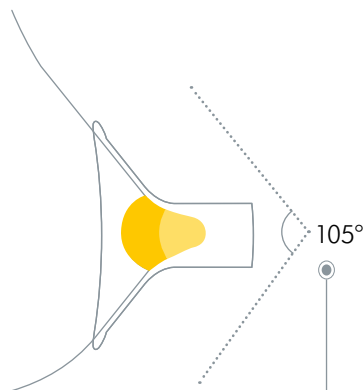

Les recherches ont également démontré qu'un col de tétérerie incliné à 105° réduisait le point de contact potentiellement inconfortable avec le bord.



La nouvelle tétérerie pivotant à 360°, il est possible de la tenir dans différentes positions.

---

# 100%

d'entre elles affirment  
qu'il épouse bien le sein<sup>2</sup>

---

# 83%

d'entre elles affirment ressentir  
une expression plus naturelle<sup>2</sup>

---

# 100%

d'entre elles ont affirmé  
avoir une marque  
minime sur la peau,  
voire aucune<sup>2</sup>



# Une séance d'expression plus détendue et davantage de lait

Le confort et la détente sont nécessaires pour une expression efficace, car le stress et l'inconfort bloquent l'ocytocine, indispensable à l'écoulement du lait.<sup>3</sup> « Agréable », « facile » et « sans douleur » sont les qualificatifs fréquemment utilisés par les mamans qui ont testé le set pour tire-lait pendant cinq jours. Aucune d'entre elles n'a mentionné de stress pendant l'expression.<sup>2</sup>

Le set pour tire-lait PersonalFit™ PLUS possède également une protection intégrée anti-débordement, permettant aux mamans de l'utiliser en position détendue. Cette caractéristique est particulièrement utile pour les mamans ayant subi une césarienne ou un accouchement compliqué.

Le nouveau set pour tire-lait extrait 11 % de lait en plus après 15 minutes, par rapport aux sets standards. Il améliore également le drainage du sein de 4%<sup>1</sup>. Or drainer correctement le sein est le secret du maintien de la production de lait.<sup>4</sup>

## Exclusivité Medela

Depuis 1996, un partenariat de recherche liant Medela et l'Université d'Australie occidentale a permis de développer considérablement les connaissances sur l'allaitement et la physiologie de l'expression du lait. Elles ont aidé Medela à développer de nouveaux produits améliorant l'expérience d'expression des mamans : y compris la technologie 2-Phase Expression®, un schéma d'aspiration imitant le comportement de succion du nourrisson.



**11 %**

de lait en plus après 15 minutes<sup>1</sup>



Amélioration de

**4 %**

du drainage du sein<sup>1</sup>

### Références

<sup>1</sup> Prime DK et al. 6th ABM Europe Conference, Rotterdam, NL; 2018. <sup>2</sup> Clinical study. (NCT02492139). 2016. <sup>3</sup> Newton M, Newton N. J Pediatr. 1948; 33(6):698-704. <sup>4</sup> Kent JC et al. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2012; 41(1):114-121.

Découvrez les atouts du set pour tire-lait PersonalFit™ PLUS pour la génération à venir. Rendez-vous sur [medela.be/pfp-fr](http://medela.be/pfp-fr), [medela.lu/pfp](http://medela.lu/pfp) ou contactez votre délégué médico-pharmaceutique Medela