

Comment le set PersonalFit™ PLUS pour tire-lait Symphony® favorise les protocoles d'hygiène hospitaliers

Recueillir le lait maternel en toute sécurité

Sauvegarder les propriétés protectrices du lait maternel et limiter les risques de contamination est essentiel dans les hôpitaux. Il est donc crucial de recueillir le lait maternel en respectant des normes d'hygiène strictes.

Medela offre la gamme de sets pour tire-lait PersonalFit™ PLUS à usage hospitalier afin de satisfaire aux besoins, ressources et normes d'hygiène. Les deux versions à usage unique peuvent être déballées et utilisées directement.



Stérile et à usage unique

Conforme aux normes en vigueur relatives aux dispositifs médicaux stériles et certifié pour le stockage.

Ready-to-Use à usage unique

Fabriqué et emballé dans une salle blanche, soumis à des tests microbiologiques avant commercialisation.

Set réutilisable pour tire-lait

Peut être retraité et autoclavé pour une utilisation par plusieurs mamans.

Une manipulation hygiénique simple et facile

Les sets pour tire-lait PersonalFit™ PLUS ont également été conçus pour être manipulés le moins possible pendant l'assemblage et l'utilisation.



Aide-mémoire pour les mamans

L'emballage du set jetable pour tire-lait contient une étiquette « mémo » pour rappeler pas à pas comment utiliser le set en toute sécurité.




Protection contre les débordements

Cette fonctionnalité assure l'hygiène du set pour tire-lait PersonalFit™ PLUS grâce à sa membrane qui empêche le lait de pénétrer dans la tubulure ou le moteur.

Expression du lait : les bonnes pratiques

Attention à ne pas altérer la bonne hygiène du set PersonalFit™ PLUS par une mauvaise manipulation. Avant de toucher le set pour tire-lait ou d'exprimer leur lait, il est recommandé aux utilisatrices :

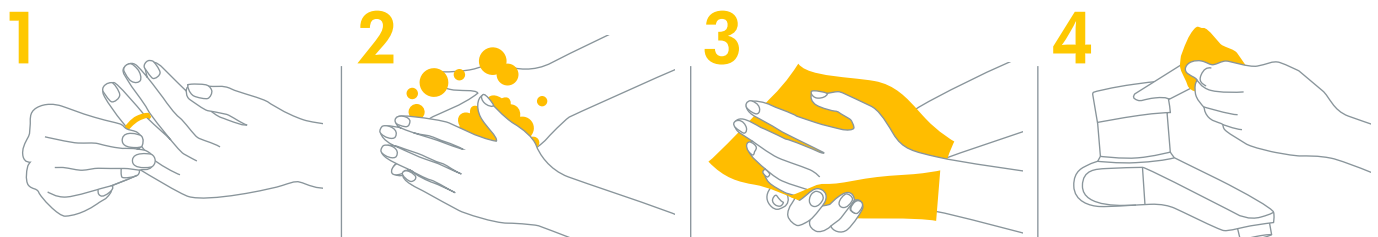

D'avoir les ongles courts et de retirer leurs bijoux.¹

De se laver soigneusement les mains.

De les sécher avec de l'essuie-tout propre.^{2,3}

De fermer le robinet sans se contaminer de nouveau les mains.¹

Découvrez la gamme PersonalFit™ PLUS sur medela.be/pfp-fr, medela.lu/pfp et apprenez-en plus à la page medela.be/materiel-formation, medela.lu/materiel-formation

Références 1 Pittet D et al. Infect Control Hosp. Epidemiol. 2009; 30(7):611–622. 2 Harrison WA et al. Am J Infect Control. 2003; 31(7):387–391. 3 Harrison WA et al. Am J Infect Control. 2003; 31(2):104–108.