

# COVID-19 Recommandations de nettoyage et désinfection pour la location de Symphony

Le virus à l'origine du COVID-19 et les autres coronavirus humain (HCoV) peuvent survivre jusqu'à 3 jours sur des surfaces comme le métal, le verre ou le plastique mais la transmission de ces virus peut être évitée par le nettoyage et l'usage de désinfectant.

## Garantie

Medela souscrit aux standards d'hygiène et de sécurité les plus stricts pour empêcher toutes transmissions d'éléments pathogènes entre les utilisateurs.

## Recommandations de nettoyage et de désinfection

### Etape 1

Seul le **personnel autorisé** peut entrer dans la zone de nettoyage et d'entretien.






### Etape 2

Tout le personnel doit suivre une hygiène des mains stricte avant d'entrer et de sortir de la zone dédiée en se lavant régulièrement les mains pendant 20 secondes minimum et en utilisant un gel hydroalcoolique à son poste de travail.

### Etape 3

Toutes les personnes en charge de nettoyer, décontaminer et de remettre en service les tire-laits doivent être munis d'un équipement de protection individuel (EPI).

## Quelles actions de protection individuelle adopter ?

| Actions  |   | Raisons   |
|--|---|---|
| Changer de vêtements et de chaussures. Utiliser des vêtements de travail et porter des chaussures adaptées   |  | La charge microbienne peut être transmise par les vêtements et les chaussures.  |
| Se laver les mains régulièrement 20 secondes minimum avec une chaude et propre. Se sécher avec une serviette en papier à usage unique. Utiliser un gel hydroalcoolique après le nettoyage des mains. |  | Le gel hydroalcoolique doit être utilisé sur des mains propres.   |
| Porter un tablier  |  | Pour réduire les éclaboussures et protéger les vêtements  |
| Porter des lunettes / visière de protection  |  | Pour minimiser les éclaboussures durant le nettoyage et éviter tout contact entre les agents désinfectants et les yeux / lunettes de vues.  |
| Porter des gants à usage unique non stériles et sans latex   |  | S'assurer que toutes les petites plaies éventuelles sont protégées. Offre une protection supplémentaire contre les agents désinfectants et toutes charges microbiologique potentielles. |


# Nettoyage et désinfection des tire-laits en retour de location ou en service de réparation

**Nettoyer** – Essuyer le tire-lait avec un chiffon propre et humide (non imbibé). Utiliser de l'eau potable et du liquide vaisselle classique ou un détergent non abrasif. Laisser reposer 5 minutes et laisser sécher à l'air.

**Désinfecter** - Essuyer le tire-lait avec un chiffon propre et humide (non imbibé). Vous pouvez utiliser un désinfectant à base d'alcool (minimum 70% d'alcool). Laisser reposer 5 minutes et laisser sécher à l'air.

Une liste des désinfectants approuvés pour le tire-lait Symphony et éprouvés contre le SRAS-CoV-2 selon leurs fabricants est disponible sur la page du site Medela dédié à l'information sur le COVID.


## Recommandations de nettoyage et désinfection

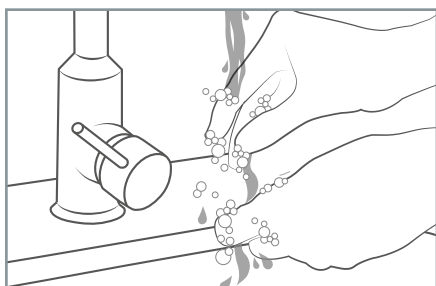


1. Laver ses mains pendant au moins 20 secondes avec du savon et de l'eau chaude. Sécher. Appliquer des gants et un EPI.




2. Appliquer du détergent sur un tissu propre et essuyer l'extérieur et l'intérieur de la valise. Laisser reposer 5 minutes et sécher à l'air libre.

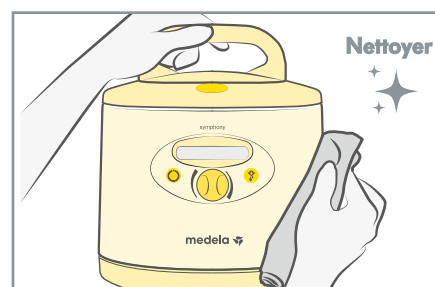


3. Appliquer du détergent sur un tissu propre et essuyer l'extérieur du tire-lait. Laisser reposer 5 minutes et sécher à l'air libre.

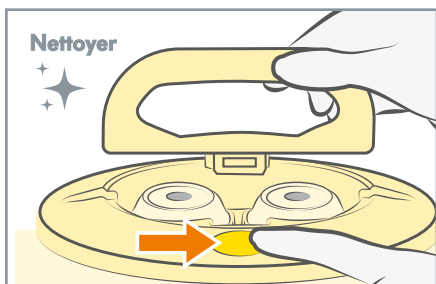


4. Avec un chiffon humide, essuyer soigneusement la poignée et le couvercle. Nettoyer soigneusement le bouton-poussoir ainsi que la zone interne.

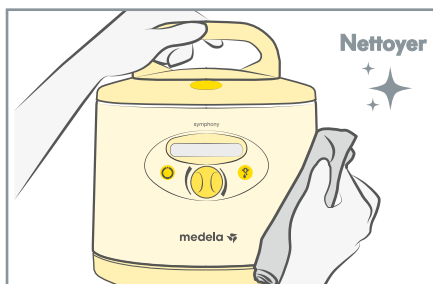


5. Essuyer soigneusement avec un chiffon humide en prenant soin de nettoyer les boutons d'affichage et le bouton de commande.

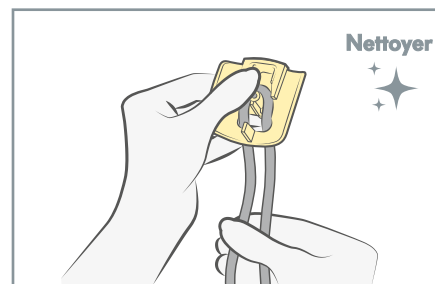

6. Essuyer soigneusement le câble électrique avec un chiffon humide.

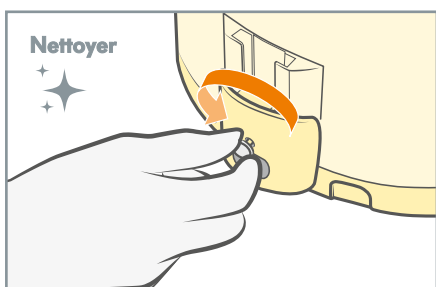

7. Retirer le protecteur de carte et la carte. Essuyer les deux avec un chiffon humide.

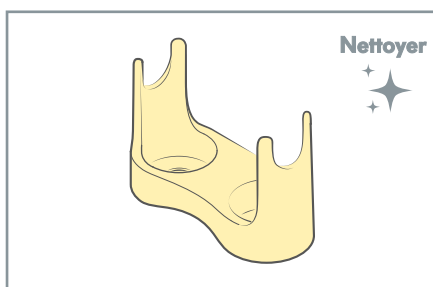

8. Retirer et placer le porte-biberon dans l'eau chaude et le détergent, laver, rincer et sécher.



9. Désinfecter avec une lingette ou un agent désinfectant approuvé. Laisser sécher à l'air libre. Suivre les étapes 2 à 8 pour désinfecter la valise, le tire-lait, le câble et le porte-biberon.

Enlever les gants selon les directives de l'EPI. Se laver les mains immédiatement. Jeter les chiffons, lingettes et gants usagés dans un sac en plastique et fermer ou sceller-le. Ce sac doit être placé dans un autre sac et mettre au rebut quotidiennement.